

Údržba bez-uhlíkových mikromotorů MX-i



Tohle zdravotnické zařízení je dodáváno v "nesterilním" stavu. Ujistěte se, že je tento postup dodržován i před prvním použitím nástroje.

1 Příprava



A. VNITŘNÍ ČIŠTĚNÍ

- Vypláchněte vnitřek mikromotoru pod tekoucí vodou <math><38^{\circ}\text{C}</math>

B. EXTERNÍ ČIŠTĚNÍ

- Očistěte povrch mikromotoru pod tekoucí vodou <math><38^{\circ}\text{C}</math>

3 Dezinfekce



A. POVRCHOVÁ DEZINFEKCE

(Dle instrukcí výrobce vašeho dezinfekčního prostředku)

⊘ Neponořujte přístroj do dezinfekční nádoby

NEBO

B. TERMÁLNÍ DEZINFEKCE

(Dle instrukcí výrobce termální čističky)

5 Sterilizace



A. VLOŽTE MIKROMOTOR DO STERILIZAČNÍHO SÁČKU

B. STERILIZUJTE V SOULADU S INSTRUKCEMI VÝROBCE AUTOKLÁVU

- Nářadí s tímto symbolem: , je možné sterilizovat v autoklávu